



gebruiksaanwijzing

Boemerang SMALL/MEDIUM

Indicatie

Compenseren van flecterende nek, romp en/of armen. Ondersteuning en preventie voor decubitus aan hoofd, nek, schouders, (thoracale) wervelkolom, armen en/of knieën.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® BOEMERANG (SMALL/MEDIUM) als nek-/kniekussen gebeurt op basis van de volgende twee stappen.

Stap 1:

Positioneer de ligorthese onder de nek of knieën van de cliënt.

Stap 2:



Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam, zodat nek, romp of knieën optimaal worden ondersteund.

Small

Voor ondersteuning van de nek kan de FlexiOr® BOEMERANG SMALL toegepast worden. Daarnaast kan de ligorthese ook als kniekussen worden gebruikt. Tip: bij ernstige contracturen of pijnklachten aan knieën kan het kussen gecombineerd worden met een FlexiOr® DIPLEG ligorthese.

Medium

Bij zowel lig- als zithouding kan de FlexiOr® BOEMERANG MEDIUM worden toegepast ter ondersteuning van de nek, romp en armen. Tip: door het kussen op schoot of op een werkblad te plaatsen worden geflecteerde armen ondersteund en worden bedreigde ellebogen tegen decubitus beschermd.

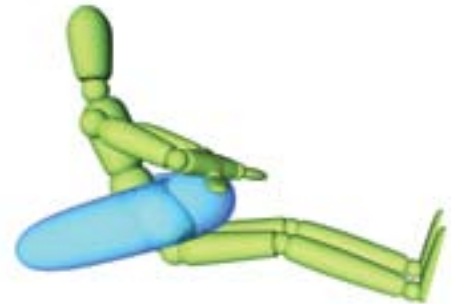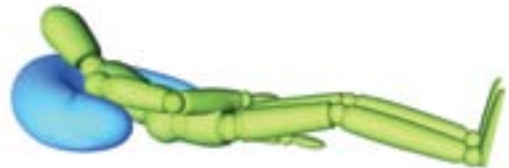



gebruiksaanwijzing

Boemerang LARGE/XL

Indicatie

Compenseren van flecterende nek, romp en/of armen. Ondersteuning en preventie voor decubitus aan hoofd, nek, schouders, (thoracale) wervelkolom, armen en/of knieën.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® BOEMERANG (LARGE/XL) als nekkussen gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

Stap 1 (optioneel):

Plaats een 'standaard' hoofdkussen verticaal onder de nek van de cliënt vanaf lumbaal*.

Stap 2:

Positioneer de ligorthese onder het lichaam van de cliënt en (eventueel) bovenop het hoofdkussen.

Stap 3:

Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam, zodat nek, romp en/of armen optimaal worden ondersteund.

* *Tip: de uitvoeringen LARGE en XL van de FlexiOr® BOEMERANG ligorthese zijn leverbaar met een geïntegreerd lumbalkussen.*

Large

Specifiek voor ondersteuning in bed is de FlexiOr® BOEMERANG LARGE ontwikkeld. Het kussen biedt ondersteuning bij zowel rug- als zijligging en is lang genoeg om naast de nek, romp en armen ook de handen te ondersteunen.

XL

Bij rug-, zij- en buikligging, maar ook bij een zittende houding biedt de EXTRA LARGE-uitvoering van de FlexiOr® BOEMERANG adequate ondersteuning en ontspanning. Daarnaast biedt het kussen bescherming aan sterk geflecteerde armen en handen.



hoofdkussen optioneel





MADE IN HOLLAND

FLEXIOR®

TRIEMSTERLOANE 58

9298 VW KOLLUMERZWAAG

TEL. 0511 - 44 77 77

E-MAIL: info@flexior.nl

www.flexior.nl

DISCLAIMER

- ▶ BIJ ELKE TWIJFEL OVER DE INZET EN HET GEBRUIK EEN FLEXIOR® HULPMIDDEL NEEMT U DIRECT CONTACT OP MET EEN ZORGVERLENER OF DE PRODUCENT.
- ▶ ELK ERNSTIG VOORVAL IN VERBAND MET EEN FLEXIOR® HULPMIDDEL MOET GEMELD WORDEN BIJ DE PRODUCENT EN DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD.

Laatst gewijzigd op 1 januari 2020 (versie 3.3)

DOEL & GEBRUIKERS

FlexiOr® hulpmiddelen worden toegepast ter vermindering van het risico op decubitus en ter ondersteuning en ontspanning van de (onderste) ledematen. Tot de gebruikers behoren mensen met de ziekte van Alzheimer, mensen met neurologisch letsel (o.a. CVA, MS, dwarslaesie), personen met gewrichtsaandoeningen (o.a. reumatoïde artritis en artrosos deformans), zorgvragers met aangeboren of verworven afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat (o.a. rugklachten, spierdystrofie, bekkeninstabiliteit) en mensen die een operatieve ingreep hebben ondergaan.

HERINZETBAARHEID

FlexiOr® hulpmiddelen zijn herinzetbaar, op voorwaarde dat er sprake is van gedegen reiniging en desinfectie volgens de gangbare richtlijnen. Ligortheses mogen in de wasmachine (tot 90°C), mits de vulling wordt verwijderd en de orthese door een hoes wordt beschermd tegen mechanische beschadiging. Trommeldrogen wordt afgeraden, aangezien dit de beschermende inco-stof kan beschadigen. Hoezen en fixatiedoeken mogen, mits voorzichtig, in de wasmachine en trommeldroger. *Zie tevens aanwijzingen waslabel.*

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Jodium en kleurstoffen laten verkleuringen in het materiaal achter. Het materiaal is bestand tegen bloed, urine, zuur en loog. De inco-stof is brandwerend, lichtecht en is gekleurd met lood-, cadmium- en chroom-6 vrije pigmenten. De inhoud van de ligortheses is, door dubbele sluiting(en) en vulopening(en), aanpasbaar op individuele behoeften.

SPECIALE VOORWAARDEN

- ▶ OPSLAAN IN DROGE OMGEVING
- ▶ NIET MET SCHERPE VOORWERPEN OPENEN
- ▶ VULLINGSGRAAD ALLEEN TE WIJZIGEN DOOR DESKUNDIGE
- ▶ PAS ALTIJD 30-45° WISSELLIGGING TOE
- ▶ VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIIGGING
- ▶ VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
- ▶ GARANTIE (12 MAANDEN) VERVALT BIJ ONJUISTE BEHANDELING OF ONEIGENLIJK GEBRUIK