



gebruiksaanwijzing

# Comfort

## Indicatie

Matige tot ernstige flexie-/adductieproblemen van knieën en heupen.

## Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® COMFORT ligorthese gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

### Stap 1:

Breng het kussen vanaf het voeteneind onder de hielen aan.

### Stap 2:

Trek het kussen onder de benen naar boven richting de liezen, zodat de benen over de volle lengte worden ondersteund.



### Stap 3:

Masseer het halfvemaan gedeelte van het kussen omhoog, zodat het de knieën beschermt.

*\* Situatieschets: cliënt ligt in rugligging, ligorthese verticaal, het halfvemaan gedeelte wijst richting cliënt, hoge deel bij de voeten, lage deel tegen de stuit.*

## Attentie

- Links-rechtsverschillen zijn te compenseren via vulopeningen.
- De hielen steken bij voorkeur uit, maar mogen ook wegzinken in het kussen. Let op: de inhoud moet voldoende ruimte laten.
- Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselligging toe te passen. Aangezien het kussen zich voegt naar de houding van de cliënt hoeft de orthese hierbij niet verwijderd te worden.
- Bij hygiënische verzorging van bijvoorbeeld liezen of stuit hoeft de orthese niet verwijderd te worden. Het simpelweg terug trekken van het kussen tot de onderbenen creëert ruimte voor behandeling zonder ondersteuning te verliezen.

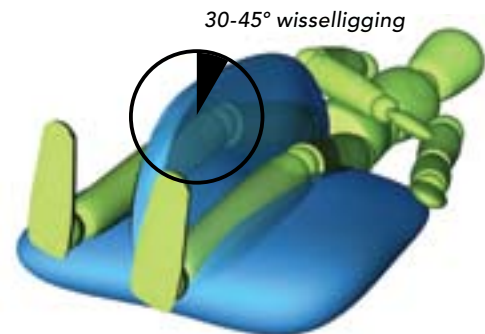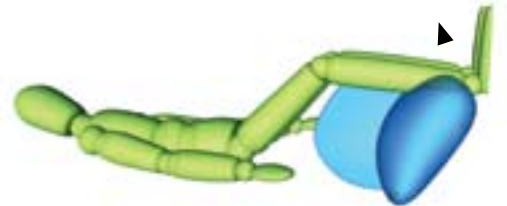

PAS ALTIJD 30-45° WISSELLIGGING TOE  
VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING  
VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIIGGING



MADE IN HOLLAND

FLEXIOR®

TRIEMSTERLOANE 58

9298 VW KOLLUMERZWAAG

TEL. 0511 - 44 77 77

E-MAIL: [info@flexior.nl](mailto:info@flexior.nl)

[www.flexior.nl](http://www.flexior.nl)

#### DISCLAIMER

- ▶ BIJ ELKE TWIJFEL OVER DE INZET EN HET GEBRUIK EEN FLEXIOR® HULPMIDDEL NEEMT U DIRECT CONTACT OP MET EEN ZORGVERLENER OF DE PRODUCENT.
- ▶ ELK ERNSTIG VOORVAL IN VERBAND MET EEN FLEXIOR® HULPMIDDEL MOET GEMELD WORDEN BIJ DE PRODUCENT EN DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD.

Laatst gewijzigd op 1 januari 2020 (versie 3.3)

#### DOEL & GEBRUIKERS

FlexiOr® hulpmiddelen worden toegepast ter vermindering van het risico op decubitus en ter ondersteuning en ontspanning van de (onderste) ledematen. Tot de gebruikers behoren mensen met de ziekte van Alzheimer, mensen met neurologisch letsel (o.a. CVA, MS, dwarslaesie), personen met gewrichtsaandoeningen (o.a. reumatoïde artritis en artrosos deformans), zorgvragers met aangeboren of verworven afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat (o.a. rugklachten, spierdystrofie, bekkeninstabiliteit) en mensen die een operatieve ingreep hebben ondergaan.

#### HERINZETBAARHEID

FlexiOr® hulpmiddelen zijn herinzetbaar, op voorwaarde dat er sprake is van gedegen reiniging en desinfectie volgens de gangbare richtlijnen. Ligortheses mogen in de wasmachine (tot 90°C), mits de vulling wordt verwijderd en de orthese door een hoes wordt beschermd tegen mechanische beschadiging. Trommeldrogen wordt afgeraden, aangezien dit de beschermende inco-stof kan beschadigen. Hoezen en fixatiedoeken mogen, mits voorzichtig, in de wasmachine en trommeldroger. *Zie tevens aanwijzingen waslabel.*

#### BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Jodium en kleurstoffen laten verkleuringen in het materiaal achter. Het materiaal is bestand tegen bloed, urine, zuur en loog. De inco-stof is brandwerend, lichtecht en is gekleurd met lood-, cadmium- en chroom-6 vrije pigmenten. De inhoud van de ligortheses is, door dubbele sluiting(en) en vulopening(en), aanpasbaar op individuele behoeften.

#### SPECIALE VOORWAARDEN

- ▶ OPSLAAN IN DROGE OMGEVING
- ▶ NIET MET SCHERPE VOORWERPEN OPENEN
- ▶ VULLINGSGRAAD ALLEEN TE WIJZIGEN DOOR DESKUNDIGE
- ▶ PAS ALTIJD 30-45° WISSELLIGGING TOE
- ▶ VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIJGING
- ▶ VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
- ▶ GARANTIE (12 MAANDEN) VERVALT BIJ ONJUISTE BEHANDELING OF ONEIGENLIJK GEBRUIK